

WYPOSAŻENIE
PLACÓWEK
MEDYCZNYCH



adres: Egerton
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
tel.: 32 728 10 05
faks: 32 757 91 44
e-mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK DO PRZEWOZU LEKÓW

DURO 1



DATA WYDANIA: 13.11.2015



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznaczących zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!

Opis produktu

Wózek do przewozu leków odpowiedni dla każdej placówki medycznej. Jest wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Ma prostą i przestrzenną konstrukcję. Jest łatwy do utrzymania w czystości dzięki dużym odstępom między półkami.

Zastosowanie

Wózek Duro 1 służy do przewozu leków. Może być wykorzystywany we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz gabinetach zabiegowych. Jest przeznaczony dla personelu medycznego jako sprzęt pomocniczy.

Dane techniczne

Model	Duro 1
Wysokość	94 cm
Szerokość	77,5 cm
Głębokość	45,5 cm
Koła	4, w tym 2 z indywidualną blokadą

Wyposażenie

Brak dodatkowego wyposażenia.



Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wózek nie służy do przewożenia materiałów medycznych.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń.
- Zabrania się użytkowania wózka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.



Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych produkt należy czyścić wilgotną szmatką, za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować wózka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Wózek należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.