

WYPOSAŻENIE  
PLACÓWEK  
MEDYCZNYCH



Egerton  
adres: ul. Legnicka 21  
41-811 Zabrze  
tel.: 32 728 10 05  
faks: 32 757 91 44  
e-mail: info@egerton.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOTEL ROZKŁADANY

EGERTON HILO PLUS



DATA WYDANIA: 20.04.2017



## Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

## Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



120 kg Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

## Opis produktu

Dwufunkcyjny fotel rozkładany Hilo Plus o funkcji zarówno fotela, jak i łóżka został zaprojektowany specjalnie na potrzeby osób odwiedzających swoich bliskich w szpitalach i innych placówkach medycznych. Rama jest wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą proszkową. Leże zostało wyłożone pianką poliuretanową pokrytą z zewnątrz wytrzymałym materiałem skóropodobnym odpornym na przerwanie, ścieranie i przebarwienia. W stosunku do modeli Hilo i Hilo Lux prezentowany model został poszerzony, powiększony oraz wypełniony grubszym wkładem. Ze względu na walory estetyczne Hilo Plus doskonale komponuje się z każdym wnętrzem: czy to szpitala, czy sanatorium lub domu opieki.

## Zastosowanie

Fotel rozkładany jest przeznaczony dla osób towarzyszących choremu oraz personelu medycznego (jeżeli chory wymaga stałej obecności opiekuna). Jest niezastąpiony zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych. Może być stosowany jako wyposażenie wszystkich oddziałów szpitalnych oraz placówek opiekuńczych. Umożliwia dłuższe towarzyszenie dziecku lub dorosłemu podczas rekonwalescencji, zapewniając wygodną pozycję siedzącą bądź leżącą. Na noc fotel przekształca się w łóżko, rozkładając jego segmenty, a na dzień z powrotem składa do bardziej ekonomicznej formy fotela. Jest bardzo prosty w obsłudze – składanie i rozkładanie wykonuje się jednym ruchem ręki. Produkt zajmuje mało miejsca i można go łatwo przechowywać oraz transportować.

## Dane techniczne

Model	Hilo Plus
Długość (złożony)	99 cm
Długość (rozłożony)	206 cm
Szerokość	81 cm
Wysokość siedziska	40 cm
Maksymalna waga pacjenta	120 kg



## Wyposażenie

Brak dodatkowego wyposażenia.

## Opis montażu

Instrukcja montażu stanowi osobny dokument w postaci prostych i przejrzystych rysunków dołączany do każdego egzemplarza produktu.



### Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Produkt nie służy do transportowania pacjenta.
- Produkt służy do spoczynku wyłącznie jednej osoby w tym samym czasie.
- Fotel jest przeznaczony dla osób o maksymalnej wadze ciała 120 kg.
- Produkt w wersji złożonej służy do siedzenia, a rozłożonej do leżenia. Zabrania się stawania na nim.
- Użytkowanie na podłożu niedającym odpowiedniego podparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaaszczonym, jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń ramy nośnej wyrobu.
- Zabrania się użytkowania fotela w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- W przypadku pozostawienia produktu w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko nagrzania jego elementów.
- Przy składaniu i rozkładaniu produktu należy zachować szczególną ostrożność z powodu ryzyka przytraśnięcia palca.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.



### Przeciwwskazania

Produkt nie powinien być stosowany:

- w przypadku pacjentów po przebytych urazach lub poddanych operacjom chirurgicznym w ostatnim czasie;
- w przypadku wystąpienia stanów zapalnych lub otwartych ran w obszarze ciała, które mają bezpośredni kontakt z produktem;
- w przypadku występowania bólu o niezidentyfikowanej przyczynie;
- w bezpośrednim kontakcie ze skórą – leże powinno być dodatkowo zabezpieczone, np. kocem.

### Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych ramę należy czyścić wilgotną szmatką. Leże trzeba czyścić za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować fotela w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

### Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Fotel należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

### Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.