

WYPOSAŻENIE  
PLACÓWEK  
MEDYCZNYCH

**Egerton**

Egerton  
adres: ul. Legnicka 21  
41-811 Zabrze  
tel.: 32 728 10 05  
faks: 32 757 91 44  
e-mail: info@egerton.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ŁÓŻKO SKŁADANE SK062

#### EGERTON FOLIO



DATA WYDANIA: 20.04.2017



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

## Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

## Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



120 kg

Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

## Opis produktu

Składane łóżko szpitalne Egerton Folio jest rozwiązaniem ekonomicznym i praktycznym niezbędnym w każdym szpitalu. Produkt spełnia wszystkie wymagania stawiane łóżkom szpitalnym. Rama łóżka jest wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą proszkową, natomiast leże z wkładem piankowym pokryte z zewnątrz materiałem odpornym na przerwanie, ścieranie i przebarwienia. Regulowany kąt nachylenia oparcia pleców zapewnia pacjentowi wygodną pozycję. W postaci złożonej zajmuje mało miejsca i można go łatwo magazynować oraz transportować.

## Zastosowanie

Składane łóżko jest przeznaczone do wszystkich oddziałów szpitalnych, a zwłaszcza na oddział ratunkowy i izbę przyjęć oraz wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić tymczasowe braki miejsc leżących. Z racji funkcjonalnej konstrukcji idealnie nadaje się do szpitali polowych. Doskonale sprawdza się w sytuacji awaryjnej, ale w razie konieczności może służyć pacjentowi przez dłuższy czas.

## Dane techniczne

rozłożone

Model	SK062
Długość (złożone)	33 cm
Długość (rozłożone)	191 cm
Szerokość	77 cm
Wysokość (złożone)	122 cm
Wysokość (rozłożone)	57 cm
Koła	6 dużych (o średnicy 7 cm)
Maksymalna waga pacjenta	120 kg



## Wyposażenie

- Uchwyt na stojak kroplówki.
- Uchwyt na worki drenażowe lub urologiczne.

## Opis montażu

Instrukcja montażu stanowi osobny dokument w postaci prostych i przejrzystych rysunków dołączany do każdego egzemplarza produktu.



## Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Produkt nie służy do transportowania pacjenta.
- Leże służy tylko do spoczynku dla jednej osoby w tym samym czasie, zabrania się stawiania na nim.
- Leże przeznaczone jest dla osób o maksymalnej wadze ciała 120 kg.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń ramy nośnej wyrobu.
- Zabrania się użytkowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- W przypadku pozostawienia łóżka w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko narażenia jego elementów.
- Użytkowanie na podłożu niedającym odpowiedniego podparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapaszczonym, jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu.
- Przy składaniu i rozkładaniu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia palca.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Na łóżku nie należy składować żadnych przedmiotów ani płynów.
- Na częściach tapicerowanych nie kłaść przedmiotów ostrych i ciężkich mogących zniszczyć pokrycie.
- Nie siadać na ruchomym segmencie pleców.



## Przeciwwskazania

Produkt nie powinien być stosowany:

- w przypadku pacjentów po przebytych urazach lub poddanych operacjom chirurgicznym w ostatnim czasie;
- w przypadku wystąpienia stanów zapalnych lub otwartych ran w obszarze ciała, które mają bezpośredni kontakt z produktem;
- w przypadku występowania bólu o niezidentyfikowanej przyczynie;
- w bezpośrednim kontakcie ze skórą – leże powinno być dodatkowo zabezpieczone, np. kocem.

## Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych ramę należy czyścić wilgotną szmatką. Leże trzeba czyścić za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować łóżka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

## Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Łóżko należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

## Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.